

TEXIMASQUE - Référence : N4 Notice d'utilisation

1. Domaine d'utilisation

- Ce masque est destiné au milieu professionnel et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.
- Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19
- L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activités (hôtesse de caisses, agents des forces de l'ordre).
- Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.
- Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

2. Recommandations de manipulation des masques

- avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
- appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte
- lorsque l'on porte un masque :
 - éviter de le toucher
 - ne pas déplacer le masque
- chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique
- si besoin de boire ou de manger, changer de masque
- lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique
- pour retirer le masque :
 - l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ;
 - le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou dans un sac prévu à cet usage ;
 - se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique



1. Déplier le masque



2. Positionner le masque sur le nez et la bouche en incluant le menton



3. Accrocher le masque : passer les élastiques derrière les oreilles



4. Assurer de l'étanchéité du masque : le nez, la bouche et le menton doivent être recouverts

3. Performances

Masque catégorie 1 « UNS 1 » = masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

- Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%
- Perméabilité à l'air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa
- **Le temps de port du masque est limité à 4 heures.**
- Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins.

4. Stockage et entretien du masque

- Masques non utilisés à stoker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière
- Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.
- Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour. **Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 5 fois.**

5. Composition de la matière principale

Masque tri-couches composé de PET et Cellulose
Conditionnement : lot de 30 masques

6. Nos références

Document spécification de l'AFNOR SPEC S76-001
Lettre n°3 de la DGA à l'attention des industriels sollicitant DGA maîtrise NRBC pour les masques
Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

7. Coordonnées du fabricant



MDB Texinov®
56 ROUTE DE FERROSSIERE
38110 SAINT DIDIER DE LA TOUR
France
Téléphone : + 33 (0)4 74 97 44 75
Email : medical@texinov.fr